

## 37701 MANUALE VISIVO




All'interno della scatola trova, un supporto schiena, due supporti laterali con braccioli, un cuscino, la seduta con il vaso sotto, il coperchio per il vaso, un supporto trasversale e kit montaggio.



Per comodità, vi suggeriamo di utilizzare il pavimento come base di appoggio.


Prendere la seduta con il vaso, posizionare le coperture di plastica, che trovate nel kit di montaggio, sui tubolari.

Posizionate il primo dei supporti laterali, avendo molta cura di far trovare i due fori che trovare lateralmente, rivolti verso l'esterno, laddove la seduta risulta con la forma tondeggiante.

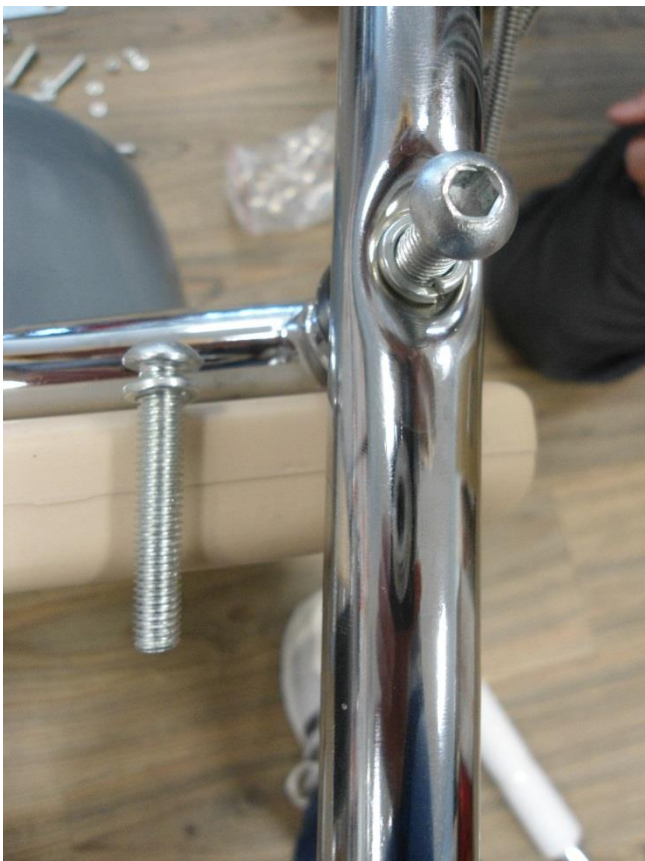


Collocare la vite, utilizzare quella che viene visualizzata nell'immagine di lato.

Attendere la fine per stringere forte le viti.

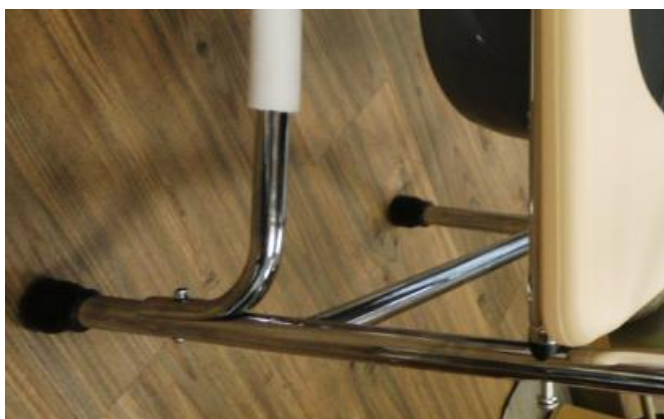

**Inserire il supporto laterale, utilizzando la vite più piccola in dotazione.**

**Attendere la fine per stringere forte le viti.**

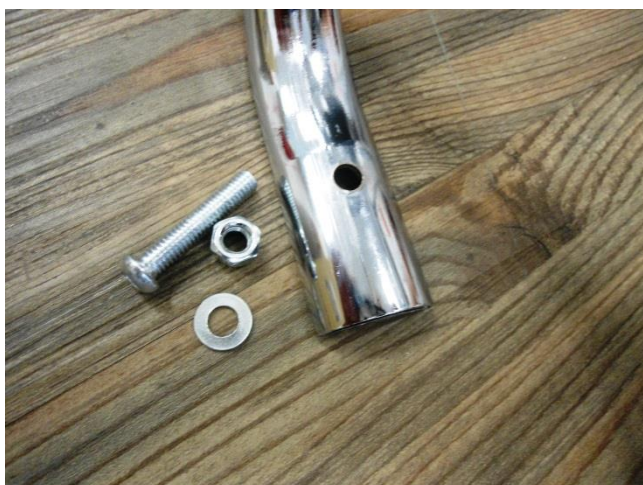

**Effettuare la stessa operazione con il secondo supporto laterale.**

**L'asta più corta serve da blocco tra i due supporti laterali.**

**Attendere la fine per stringere forte le viti.**





Andiamo a posizionare lo schienale, sul retro dei supporti laterali troviamo due fori, che dovranno combaciare con quelli che ci sono sullo schienale.

Qui andranno utilizzate le ultime 4 viti rimaste.

Attendere la fine per stringere forte le viti.



**Procedere a stringere tutte le viti.**

**Per togliere il vaso contenitore, l'estrazione si effettua dal retro.**

**Posizionare il cuscino sopra per utilizzare la comoda come normale seduta.**

**Attenzione: ASSICURARSI DI AVER PROVVEDUTO A STRINGERE TUTTE LE VITI PRIMA DEL UTILIZZO.**